



Aufbauanleitung Bett Tisch, fahrbar, höhenverstellbar

Verpackungsinhalt:

- 1 Stück Tischplatte
- 1 Stück Rahmen-Unterteil lackiert
- 1 Stück Rahmen-Oberteil verchromt
- 2 Stück Querfüße mit jeweils 2 Rollen
- 1 Stück Drehknauf mit Innengewinde
- 1 Stück Drehknauf mit Gewindestift
- 2 Stück Schrauben
- 2 Stück Unterlegscheiben
- 1 Stück Distanzscheibe
- 1 Stück Werkzeug

Unsere Produkte werden nach strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt. Packen Sie bitte alle Teile vorsichtig aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit.

Aufbauanleitung:

- Schrauben Sie als erstes die beiden Querfüße an das Rahmen-Unterteil. Verwenden Sie dazu die beiden Schrauben mit den Unterlegscheiben und das entsprechende Werkzeug. Als Hinweis, welches Teil wohin kommt, beachten Sie bitte die Buchstaben A-D an den entsprechenden Teilen.
- Stellen Sie das Unterteil auf die Rollfüße und schieben das Vierkantprofil des Rahmen-Oberteils in das Rahmen-Unterteil.
- Fixieren Sie die Rahmenteile seitlich unter Verwendung des Drehknaufes mit Gewindestift.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von dem runden Teil des verchromten Rahmen-Oberteils und schieben Sie die Tischplatte darauf. Dabei muss das bewegliche Teil exakt mit dem Rohr des Rahmen-Oberteils übereinstimmen.
- Danach schieben Sie die Distanzscheibe, mit dem kleinen Durchmesser zuerst, auf den beweglichen Rahmen des Oberteils und befestigen dieses mit dem Drehknauf mit Innengewinde.
- Durch lockern der beiden Drehknöpfe können Sie die Tischhöhe und Tischneigung individuell verändern.
- Vergewissern Sie sich, dass danach die Drehknöpfe wieder fest fixiert werden.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass alle Teile fest verschraubt sind.