

Gebrauchsanweisung – Operating instructions
Duschhocker DINO – Shower stool Dino
Art.-Nr. – Art. No.: 550 500 100



Indikation – Indication

Duschhilfen sind Duschsitze, Duschhocker, Duschstühle, Duschligen und fahrbare Duschligen, die ausschließlich für den häuslichen Bereich bestimmt sind. Duschhilfen kommen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Duschhilfen sind dann indiziert, wenn die Standsicherheit des Anwenders eingeschränkt ist. Liegt auch eine Minderung der Sitzstabilität (z.B. Lähmungen im Rumpfbereich) oder eine Schwäche beim Hinsetzen /Aufstehen vor, müssen ggf. Rückenlehne und Seitenlehnen vorhanden sein. Ggf. ist auch der Einsatz von Duschligen erforderlich.

Shower aids are suitable for persons who are not able to shower without medical devices. In case of instability in standing. In case of reduced stability in sitting or weakness when sitting down or standing up, backrest and armrest must be used.

Lieferumfang – Product contents



Stuhl komplett




Shower stool complete

Montage – Assembling

Duschhocker ist komplett gebrauchsfertig montiert.

Shower stool is completely assembled for use.

Höhenverstellung der Beine – Height adjustment of legs 34 - 52 cm

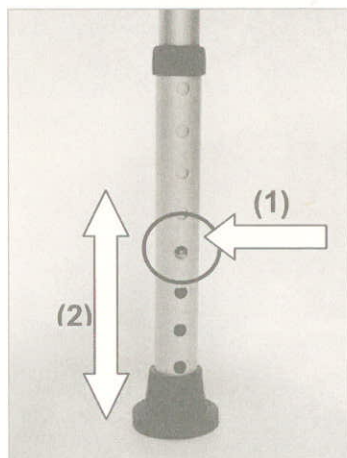

Vor Benutzung den Duschhocker auf die gewünschte Höhe einstellen.

Für die Höhenverstellung der Beine: Knopf drücken (1) und gleichzeitig das Bein herausziehen bzw. einschieben bis der Knopf in der gewünschten Position einrastet (2). Versichern Sie sich, dass der Druckknopf richtig eingerastet ist.

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

Sicherheitshinweise – Safety instructions

Duschhocker bei Defekt nicht verwenden!
Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!

*Do not use the shower stool if it is damaged!
Danger of falling!*

Maximale Belastung: 130 kg

Maximum load: 130 kg

Reinigung – Cleaning

Keine Scheuermittel verwenden!
Von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen!

*Do not use abrasives!
Clean by hand with a damp cloth!*

Technische Daten – Technical Data

Maximale Belastung – <i>Maximum load:</i>	130 kg
Durchmesser Sitzfläche – <i>Diameter seat:</i>	32 cm
Gesamtbreite – <i>Width over all:</i>	45 cm
Höhe Sitzfläche – <i>Height seat:</i>	2,7 cm
Höhenverstellung – <i>Height adjustment:</i>	8fach – 8 steps: 34 - 52 cm
Farbe - <i>Colour:</i>	weiß – <i>white</i>
Gewicht - <i>Weight:</i>	1,6 kg – 1.6 kg
Material Beine – <i>Material legs:</i>	Aluminium, silber eloxiert (rostfrei) – <i>Aluminium</i>
Material Clipverschluss – <i>Material clip lock:</i>	Messing – <i>brass</i>
Material Sitz – <i>Material seat:</i>	Kunststoff (PP) – <i>high quality plastic (PP)</i>

Wiedereinsatz - Reuse

Der Duschhocker ist, nach sicherheitstechnischer Prüfung durch den Fachhandel, für den Wiedereinsatz geeignet.

The shower stool is suitable for further use after technical check by a specialized dealer.

Garantie - Warranty

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

We issue a warranty of 24 months from date of purchase.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.

Subject to technical alterations.

Stand - As per: 07/2008

