



Anwendungshinweise zum Haarwaschbecken

- Zuerst blasen Sie den unteren Ring des Haarwaschbeckens auf und verschließen ihn mit dem Stöpsel. Somit kann keine Luft aus diesem Ring entweichen.
- Nun wird der obere Ring aufgeblasen und ebenfalls verschlossen.
- Heben Sie den Kopf des Patienten/Anwenders etwas an und schieben Sie das Haarwaschbecken mit der Öffnung an dessen Schulter.
- Beachten Sie bitte, dass bei geschlossenem Ablaufstöpsel nicht zu viel Wasser in das Haarwaschbecken gegeben wird, dies könnte zum Überlaufen führen.
- Bitte beachten Sie, dass der Ablaufschlauch am Bettende gerade herunterhängt und dieser in einem Eimer endet. Der Schlauch sollte nicht geknickt sein, nur so kann das Wasser ordnungsgemäß ablaufen.
- Nach Beendigung der Haarwäsche reiben Sie das Haarwaschbecken möglichst trocken und lassen es im aufgeblasenen Zustand noch etwas „ausdunsten“.
- Die Luft des Haarwaschbeckens kann nach dem Trocknen durch Herausziehen der Stöpsel wieder abgelassen werden. Jetzt können Sie das Haarwaschbecken wieder falten und platzsparend aufbewahren.