

Inhalator

Benutzerhinweise

- Stellen Sie das Inhalator-Unterteil auf eine hitzefeste Unterlage auf einem standsicheren Tisch.
- Befüllen Sie dieses Unterteil mit heißem Wasser und geben ein entsprechendes Inhalationsmittel zu. Der Inhalator kann auch mit einer fertigen Inhalationslösung befüllt werden.
- Setzen Sie das Inhalations-Oberteil vorsichtig auf und drehen es in Uhrzeigerichtung bis zum Anschlag. **Vorsicht Verbrühungsgefahr.**
- Danach können Sie mit dem Inhalationsvorgang anfangen. Zu Beginn der Anwendung sollten Sie vorsichtig schrittweise mit dem Mund und der Nase an die Inhalationsöffnung herangehen, damit Sie keine zu heißen Dämpfe einatmen.

Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie den Inhalator nicht unbeaufsichtigt stehen.
- Kinder dürfen den Inhalator nur im Beisein von Eltern oder Betreuern anwenden.
- Nach dem Befüllen mit heißem Wasser sollte der Inhalator wenn möglich nicht mehr bewegt werden. **Achtung Verbrühungsgefahr**
- Beim Kippen oder Anstoßen kann heiße Flüssigkeit auslaufen. **Achtung Verbrühungsgefahr**
- Stellen Sie den Inhalator kippstabil auf. Zu empfehlen ist das Aufstellen in einer großen Schüssel.
- Nach der Anwendung dürfen Sie die benutzte Inhalationslösung nicht ein zweites Mal benutzen.
- Entleeren und Reinigen Sie den Inhalator erst nachdem sich die Flüssigkeit genügend abgekühlt hat.
- Die Reinigung kann auch in der Geschirrspülmaschine erfolgen.

Zu allen Fragen der Anwendung und zu verwendeten Inhalationsmitteln befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker !

Art.-Nr. 3068
PZN 2819626



-2819626



CareLiv Produkte OHG
Str. d. Deutschen Einheit 8
04643 Geithain
Tel. +49 (0)3 43 41 / 4 01 39
Fax +49 (0)3 43 41 / 4 01 89
E-mail carelivprodukte@t-online.de